



Virex Detergente Health

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Eficaz frente a *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* e *Pseudomonas aeruginosa*

Finalidade de Uso

Virex Detergente Health associa a excelente ação antimicrobiana do Hipoclorito de Sódio com o poder de limpeza do Lauril Éter Sulfato de Sódio. Ideal para ser utilizado em estabelecimentos de saúde na limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos, não sensíveis ao cloro. **Virex Detergente Health** é eficaz frente a *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa*.

Características / Benefícios

- Eficaz frente a *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Mycobacterium smegmatis*, *Mycobacterium bovis* e esporos de *Clostridium difficile*, se usado dentro das concentrações indicadas;
- Atente a **RDC N° 14**, de 28 de fevereiro de 2007, classificando-se como desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos;
- Realiza procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies fixas, não sensíveis ao cloro em uma só operação;
- Diluição automática em equipamentos dosadores **Diversey**.

Modo de Usar

Como desinfetante hospitalar de superfícies fixas: Prepare uma solução de **Virex Detergente Health** na diluição de 5% (medir 1 litro de produto transferir para um recipiente adequado e completar o volume com água até 20 litros, ou então utilizar o dosador **Diversey** recomendado). Aplique a solução nas superfícies não sensíveis ao cloro a serem higienizadas, espere 10 minutos para que o produto exerça sua ação antimicrobiana, enxágue com água potável. No caso de superfícies muito sujas, repita a operação. **Como desinfetante para artigos não críticos:** Lave previamente o artigo, enxágue e seque. Aplique a solução diluída a 5% nos artigos não sensíveis ao cloro, friccione e espere o tempo de contato de 10 minutos. Enxágue com água potável e seque os artigos. Utilize-os o mais breve possível.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Levemente amarelado
pH (puro) a 25°C	12,3 – 13,3

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.





Virex Detergente Health

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Eficaz frente a *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* e *Pseudomonas aeruginosa*

Composição

Hipoclorito de Sódio, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Alcalinizante, Coadjuvante e Água.

Princípio Ativo

Hipoclorito de Sódio – Teor de Cloro Ativo: mín. 0,9% Cl₂.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

06 meses, a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0203

Este produto possui certificado Halal